



SomGauge on ensimmäinen laatuaan autoklaavattava indeksipurennan jäljennössetti, joka mahdollistaa suuremman pystysuuntaisen mitan ottamisen säädettävällä rampillaan – tämä parantaa sekä jäljennöstarkkuutta että uniapneakiskon kestävyyttä.

HELPPO KÄYTTÄÄ JA PUHDISTAA

Ergonominen ja tukeva kahva, jossa on selkeät merkinnät siirtymälle, voidaan steriloida autoklaavissa.

MONIPUOLISEMPI SÄÄDETTÄVYYS

Säädettävä ramppi varmistaa etu- ja takahampaiden pintojen tasaisen kontaktin, mikä nopeuttaa vastaanottotyöskentelyä.

SUUREMPI PYSTYSUUNTAINEN ETÄISYYS

Vähintään 3 mm:n akrylikerros koko purennan alueella tekee kiskosta kestävämmän ja murtumattoman.

MITEN KÄYTÄN SOMGAUGE-PURENNANMÄÄRITYSTYÖKALUA

Purennanmääritystyökalu on suunniteltu säätämään potilaan aloitusasento 50-60% maksimaaliseen terapeuttiseen protruusioon.

1. Vähintään 3 mm vertikaalinen etäisyys lähimpiin kuspeihin vaaditaan molemmissa leuoissa.
2. Purennan täytyy olla stabiili. Käytä esimerkiksi silikonin haarukassa aseman varmistamiseksi.
3. Suurimmalle osalle potilaista 60% maksimaalisesta protruusiosta on hyvä aloituskohta.
4. Kun aloitusasento on saavutettu, pyydä potilasta pysymään siinä 2-3 minuuttia ja pyydä palautetta asennon mukavuudesta. Säädä tarpeen mukaan.

Vinkki: Tarkista keskilinja, kun otat purentaa.

Lisätietoja ja ohjevideoita löydät osoitteesta www.somnomed.com

TILAA SOMGAUGE-SETTI
ASIAKASPALVELU@SOMNOMED.COM